

ChuChu

Automatic Breast Pump

電動 さく乳器s

取扱説明書

ご使用前に必ず
お読みください。



あんしん設計

マイペースさく乳



広口タイプ哺乳びん
対応アダプタ付

AC
アダプタ
付き

※電池はセットに入っておりません
電池でも使える(単三電池2本)

広口タイプ哺乳びんは、国内主要メーカーの製品にもご使用いただけます。

※他社のスリムタイプ哺乳びんはご使用いただけません。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

JEX ジェクス株式会社

■ セット方法

1. シリコンパッドを吸乳カップへ取り付けます（ご購入時はセットされています）。
2. 吸乳カップに黄色のパッキンがセットされていることを確認してください。パッキンがセットされていないと、十分な吸引圧が得られず、さく乳できません（ねじ部の奥にパッキンがセットされています）。
3. 哺乳びんに吸乳カップを取り付けます。スリムタイプ哺乳びんはチュチュ製のみ使用可能です。
4. 広口タイプ哺乳びんをご使用の場合は、さく乳器と広口タイプ哺乳びんの間に広口タイプ哺乳びんアダプタを取り付けてください。その際アダプタの内側に白色のパッキンがセットされていることを確認してください。
5. 吸乳カップに電動部をしっかりと挿し込みます。



■ 使用方法

※最初に使用される前と毎使用後は、全ての部品（電動部、ACアダプタを除く）を哺乳びん用洗剤などで洗浄し、消毒してください。

1. 吸乳カップを隙間がないように、しっかりと胸に当てます。
2. スイッチをONにし、さく乳を開始してください。
※まずは弱い側から始めてください。パワーダイヤルは出荷の際、最も弱い側にセットされています。
3. さく乳が始まったら、パワーダイヤルで吸引の強弱を調整してください。
4. リズム調整ボタンを小刻みに押し離したりすることによって、自分に合ったさく乳サイクルを作れます。吸引圧の変化が刺激となり母乳の分泌が促されます。
5. さく乳を止める際は、無理に乳房から外さず、リズム調整ボタンを押して、吸引圧を解除してから外してください。



※吸引中に痛みや出血などの異常があった場合はすぐにさく乳を止めてください。



※本品のさく乳効果は、体調、体質、個人差によって異なりますので、ご了承ください。

■ 以下の場合医師または助産師の指導のもとにご使用ください

- ご使用中や、ご使用後に異常を感じた場合（乳首や乳房に痛みや出血、しこり、熱がある場合など）。
- 手しぼりでさく乳ができて、さく乳器ではさく乳できない場合。
- 乳首の陥没、扁平または乳腺炎の方。

■ ACアダプタを使用する場合

- 1.ACアダプタを図のように電動部本体に接続してください。
- 2.コードが絡まっていたり、まとめた状態での使用はお避けください。また、その他のアダプタをご使用になりますと、製品破損や出火などの問題を引き起こす危険性がありますので、付属のACアダプタのみお使いください。



※効率良くご使用いただくためには、ACアダプタでの使用をおすすめします。

■ 電池を使用する場合

- 1.単三電池を2本ご用意ください(電池はセットに含まれておりません)。
- 2.電池を表示されている+-に合わせてセットしてください。
- 3.電池カバーを電池が半分見えるところでセットし、→の方向にスライドさせて閉じてください。
- 4.製品を長期間使用されない場合は、電池を取り出して保管してください。



※種類や銘柄の違う電池を混ぜて使ったり、同じ銘柄でも古い電池と新しい電池を一緒に使わないでください。

■ 使用上の注意

- さく乳以外の目的には使用しないでください。
- ご使用の際に、さく乳器が斜めになると、母乳が電動部や電池部品の中に入り、故障の原因になる可能性があります。
- 電動部を分解しないでください。
- ACアダプタをお使いの場合には、コードを引っぱったり、水気の多い場所での使用はしないでください。また使用しない時はACアダプタをコンセントから外しておいてください。万一、発熱したり、煙が出ている、異臭がする状態で使用しますと火災、感電の原因となります。その場合は、ACアダプタの使用を中止してください。
- 過度のご使用や連続しての吸引は、乳首や乳腺を痛めるおそれがありますのでおやめください。

■ 保管上の注意

- 直射日光・高温多湿を避け、涼しい清潔なところで保管してください。また、小児の手の届かない所で保管してください。
- 落としたり衝撃を与えると変形したり割れることがあります。取り扱いには十分に注意してください。

■ お手入れ方法

部品名称	素材名	耐熱温度	消毒方法		
			煮沸	薬液	レンジ
電動部	ABS POM (リズム調整ボタン)	/	×	×	×
吸乳カップ	PP	120℃	○	○	○
シリコンパッド	シリコーン	120℃	○	○	○
パッキン(黄色)	シリコーン	120℃	○	○	○
洗浄ノズル	PP	120℃	○	○	○
スタンド	ABS	80℃	×	×	×
ACアダプタ	/	/	×	×	×
広口タイプ哺乳びん アダプタ	PP	120℃	○	○	○
パッキン(白色)	シリコーン	120℃	○	○	○

部品を紛失した場合は、上記表の通り、部品販売を取り扱っております。
詳しくはChuChuホームページをご覧ください。

〈 電動部以外のお手入れ方法 〉

- 吸乳カップ、シリコンパッド、パッキンなどは、消毒することができます。電動部の表面とACアダプタが汚れた場合は、洗浄・消毒をせず、乾いた布で拭き取ってください。
- パッキン(黄色・白色)を取り出す際は、トントンとたたいて取り出してください。

〈 電動部内部のお手入れ方法 〉

- さく乳中に電動部内部に母乳が混入している可能性がありますので、ご使用後は下記の手順に従ってお手入れしてください。
- 1.哺乳びんから電動部と吸乳カップを取り外します。
 - 2.電動部の下部に洗浄ノズルを挿し込みます。
 - 3.ぬるま湯を入れた容器にノズルを2cm程度浸けてください(洗剤・薬液等を使用しないでください)。
 - 4.容器の外側に電動部の排出穴が出るようにします(容器内の水が電動部に残った母乳と混ざるのを防ぎます)。ACアダプタを使用する場合、コードが濡れないようにしてください。
 - 5.スイッチをON(パワーダイヤルは一番強い側にセット)にし、排出穴からキレイな水が出てきたら洗浄完了です。その後約30秒間電動部に空気を吸引させ、電動部に残った水を取り除き、乾いた布で電動部についた水を拭き取ってください。

※過度の洗浄は電動部内部の部品を劣化させる可能性がありますので、お避けください。電動部に悪影響を及ぼす可能性があります。



各部品の名称



広口タイプ哺乳びんは、国内主要メーカーの製品にもご使用いただけます。

※他社のスリムタイプ哺乳びんはご使用いただけません。

使用可能
一覧は
こちら→



■ 故障かなと思ったら

(動かない場合)

- ACアダプタがジャック穴に正しく接続されていることを確認してください。
- スイッチをONにしてもLEDライトがつかない場合は、電池切れです。新しい電池に交換していただくか、ACアダプタを使用してください。
- 電池の＋が正しくセットされているか確認してください。

(吸引しない、または弱い場合)

- すべての部品が正しく、しっかりとセットされていることを確認してください(2頁のセット方法を確認してください)。
- シリコンパッドが乳房にフィットしているかを確認してください。
- 吸引強度が一番強くなるまで、少なくとも30秒間電動部に空気を吸引させてください(注意:電池の残りが少ない時は、吸引力が低下します)。
- 電動部内部に母乳が付着している可能性があります。4頁のお手入れ方法に従い、洗浄してください。
- パワーダイヤルが弱い側のまま使用されていないかを確認してください(弱い側から徐々に強い側に回してください)。

(電池では作動するが、ACアダプタでは作動しない場合)

- ACアダプタの故障が考えられます。電池をご使用いただくか、6頁のお問い合わせ先「お客様相談室」までお問い合わせください。

■ 保証書について

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などおわかりにならない場合は、ジェクス株式会社お客様相談室までお問い合わせください。

保 証 書		
品名／チュチュ 電動さく乳器S		保証期間／お買い上げ日より1年間
		お買い上げ日／ 年 月 日
お 客 様	お名前	様
	ご住所	〒 電話 ()
販 売 店	住 所 店 名	〒 電話 ()

※太枠内の記入なき場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

■ 保証書規定

- 有効保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社お客様相談室へご連絡いただき、保証書と現品を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間内でも下記の場合は有償となります。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、または字句を書きかえられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変など、外部に要因がある故障・損傷。
 - 消耗部品。
- 保証書は再発行いたしません。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

お問い合わせは〈お客様相談室〉まで

☎06-6942-4416

(土・日・祝日を除く 月～金 9:30～17:00)

JEX ジェクス株式会社

〒540-0012 大阪市中央区谷町2丁目3番12号

チュチュホームページ

<http://chuchubaby.jp>